




Microlet®Next-stikkepenn / Microlet®Next-blodprovstagare / Microlet®Next-pistolatte

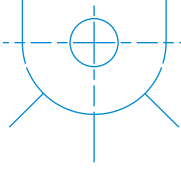

Tiltenkt kapillær blodprøvetaking og brukes sammen med lansetter til engangsbruk. • Ansett for innsamling av kapillært blod, for anvendning tillsammans med engangslansetter. • Tarkoitettu kapillaariverinäytteen ottamiseen, käytettäväksi yhdessä kertakäyttöisten lansettien kanssa.



ADVARSEL: Oppbevares utilgjengelig for barn. Denne pakningen inneholder små deler som kan forårsake kvælning hvis de svelges. • VARNING: Förvaras utom räckhåll för barn. Detta paket innehåller små delar som kan leda till kvävning om de sväls oavsikligt. • VAROITUS: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tämä pakkaus sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen vahingossa niellynä.

Microlet®Next-stikkepennen brukes til å ta kapillærblodprøver fra fingertuppen eller håndflaten, for blodsukkermålinger med kompatible lansetter. Microlet®Next-stikkepennen er beregnet for bruk av én pasient. Stikkepennen skal ikke brukes til nyfødte. • Microlet®Next används för att ta kapillärblod från fingertoppen eller handflatan i syfte att testa blodsockret med kompatibla lansetter. Blodprovstagaren Microlet®Next ska användas av en och samma patient. Blodprovstagaren är inte avsedd för nyfödda. • Microlet®Next-pistolatetta käytetään kapillaarinäytteen ottamiseen sormensäästä tai kämmenestä verengluukosmittausta varten yhdessä yhteensopivien lansettien kanssa. Microlet®Next-pistolaitte on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Pistolaitetta ei ole tarkoitettu vastasyntyneille.



Utøserfunksjon for lansetten reduserer mulig personskade ved kassering av brukte lansetter. • Lansettborttagningsfunksjonen minskar eventuella skador vid kasseringen av använda lansetter. • Lansetin irrotusominaisuus vähentää mahdollista loukkaantumisvaaraa käytettäviä lansetteja hävittäessä. • Se hele prosedyren i medfølgende pakningsvedlegg. • Se bifogad bipacksedel för fullständig procedur. • Katso tarkat toimintaohjeet sisällä olevasta pakkausselosteesta.

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheter forbeholdt. • Med ensamrätt. • Kaikki oikeudet pidätetään. Ascensia, Ascensia Diabetes Care-ogoen og Microlet er varemerker og/eller registrerte varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care og Microlet är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, Ascensia Diabetes Care-Logo ja Microlet ovat Ascensia Diabetes Care Holdings AG -yhtiön tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Vareseina, 162
20156 Milano, Italy



www.diabetes.ascensia.com

Laget i Polen.
Tillverkad i Polen.
Valmistettu Puolassa.

90011553 Rev. 07/23
6701

Microlet® next

Stikkepenn • Blodprovstagare
• Pistolaitte

Enkel, problemfri måling
Enkel, smidig testning
Hjelpo, kähes kivuton
näytteenotto

5 tydelige dybdeinstillinger
5 tydliga djupinställningar
5 selkeää pistosyvyyden
asetusta

Sikkert munstykke
Säkerhetslås på munstycket
Turvalukittava kärkikappale

Enkel utøserfunksjon
for lansetten
Enkel lansettutstøining
Hjelpo lansetin irrotus



1 SETT • ENHET • PAKKAUS

- NO** Brukes med myke, silikonbelagte Microlet®-lansetter.
- SV** Använd med smidiga silikonbelagda Microlet®-lansetter.
- F** Käytä sileiden, silikonpäällysteisten Microlet®-lansettien kanssa.

REF 85139924

1 Microlet®Next-stikkepenn
5 Microlet® sterile lansetter,
belagt med myk silikon

1 Microlet®Next-blodprovstagare
5 sterila Microlet®-lansetter,
belagda med mjukt silikon

1 Microlet®Next-pistolaitte
5 steriilä Microlet®-lansettia,
päällystetty pehmeällä
silikonilla

MICROLET®-lansett/
MICROLET®-lansett/
MICROLET®-lansetti:

